

## OHPシートを使ったクリアマスクの作り方

### 作業の前に

- ・手洗いを徹底してください。
- ・作業する時には、マスクを着用ください。
- ・作業する前に、机の上をアルコール消毒液で拭いてください。
- ・風通しのよい場所での作業が望ましいです。定期的に換気をしてください。



### 準備するもの

- ・A4サイズのOHPシート（シート1枚でマスク2枚作れます）
- ・型紙
- ・マスク用ゴム（20センチのもの2本）
- ・すき間テープ（5センチのもの2本、10センチのもの1本）
- ・ホッチキス、ハサミ、セロテープ、穴あけパンチ、定規、クリップ



すき間テープ以外にも、化粧用パフ等のスポンジ状のモノならOKです

### 作り方

#### 1. OHP フィルムのカット


##### (1) マスクの型紙に合わせて、OHP フィルムをカットする

- 📍ホッチキスで型紙とフィルムを重ねて留めると、ズレずに切りやすいです。
- 📍顔にあわせてみて大きい場合は、両サイドを切って調整してください。

##### (2) カットした OHP フィルムの両サイドに、穴あけパンチで穴を開ける

#### 2. 組立 (サンプルは見やすいように紙のものを利用しています)

- ##### (1) 両端をクリップでとめ、鼻のVカットの部分を透明テープでとめる。

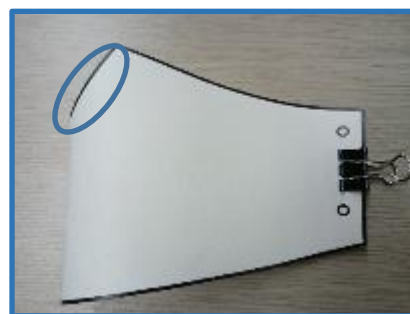

手順1. ○部分をテープでとめる

## (2) 上下にすき間テープを貼り付ける。

- ・上下中央に貼り付け。

上はVカットの横、下は中央（おおよその位置で良い）。

- 📍貼り直すとテープの粘着力が低下するため、慎重に張り付けましょう。



手順2. ○部分にテープを貼る

## (3) 両サイドの穴にゴムを取り付けて完成！

- 📍ゴムの長さは使いやすいように調整してください。



完成品と着用した様子

### 注意！

- ・使った後は消毒をしましょう。
- ・通気性が良くないので、長時間の使用には向きません。使用は短時間にしてください。
- ・違和感を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- ・他の人のものと間違えないように、端の方に名前を書いておくと良いです。